

About Vitreo

Vitreo社はオランダに本社を構える硝子体手術システム専門の製造メーカーです。
自社のR&Dにて設計・デザインした高品質の硝子体手術器具等を製造及び販売しています。

製造元



販売元



株式会社 ホワイトメディカル
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-48-2 第一ビル
TEL. 03 (3802) 0655 FAX. 03 (3802) 0688



DSP MICRO INSTRUMENTS & DSP BACKFLUSH

23G/25G/27G 硝子体手術器具 Vitreo Users Report

USERS REPORT



長崎大学 眼科 北岡 隆 教授
25g バックフラッシュ ブラッシュ

Vitrexの25Gバックフラッシュはシャフトの長さが32mmあり、眼軸の長い患者にも対応できます。長所としては、①剛性が高く扱いやすい、②シャフトが長く広角観察用のレンズに当たらないため操作しやすい、③リザーバータンクが大きく、バックフラッシュが容易、④アスピレーションチューブは取り外し可能で術者の好みに応じて passive/active 両方に使用可能、⑤先端のシリコンチップが短めでクロージャールブにも引っかかりにくい、などが挙げられます。



近畿大学医学部 堺病院 日下 俊次 教授
27G エッカード氏 ILM 鉗子(エンドグリップ)

Vitrex社製エッカード鉗子では他社製のものよりしっかりと把持ができます。また、先端部の大きさが23, 25, 27Gで同じなので、どのゲージの鉗子でも違和感なく使用できます。もう一つの特徴は器具の剛性に優れることで、27Gでも快適に使えます。シャフト長が32mmありますので、強度近視眼でも使用可能です。



愛知医科大学 眼科 瓶井 資弘 教授
27g シャー氏 X-tra グリップ鉗子45°

Vitrexの27gシャー氏X-tra鉗子を使用した感想は、まず把持力の高さに感動した。鋸歯状の内面が把持力を高めている。また、エッジがシャープでILM剥離のきっかけを作り易いが、先端が丸いので安全性が高く、細いので視認性も良い。バネ？が柔らかいので、動きがスムーズで、余分な力を必要としないため、先端の震えを最小限に抑えることができる。そして何よりも、眼軸の長い患者でも使える32mmの長さにもかかわらず、硬く・コシがありコントロールしやすい。



27 Gauge

Standard style	製品番号: BF27.D01	製品番号: BF27.D02
	 ディスポ 27G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	 ディスポ 27G バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチュービング付き

Universal backflush instrument

製品番号: BF00.R01
製品名: Vitreq バックフラッシュ ユニバーサルハンドピース
数量: 1本



- *本製品は未滅菌で、再使用可能なハンドルです。
- *リザーバー、チュービング、先端針は含まれておりません。
- *チタン製のハンドルです。

Disposable backflush consumables

reservoirs	製品番号: BF00.D52	tubing	製品番号: BF00.D53
	 ディスポ バックフラッシュ アスピレーションリザーバー		 ディスポ アスピレーションチュービング

Disposable backflush needles


23 Gauge	製品番号: BF23.D52	25 Gauge	製品番号: BF25.D52
	 ディスポ 23G バックフラッシュニードル ブラッシュ		 ディスポ 25G バックフラッシュニードル ブラッシュ



5本/箱(滅菌済み)

販売名: Vitreq ディスポーザブル バックフラッシュ
認証番号: 第229AFBZ100010000号


Disposable backflush instruments

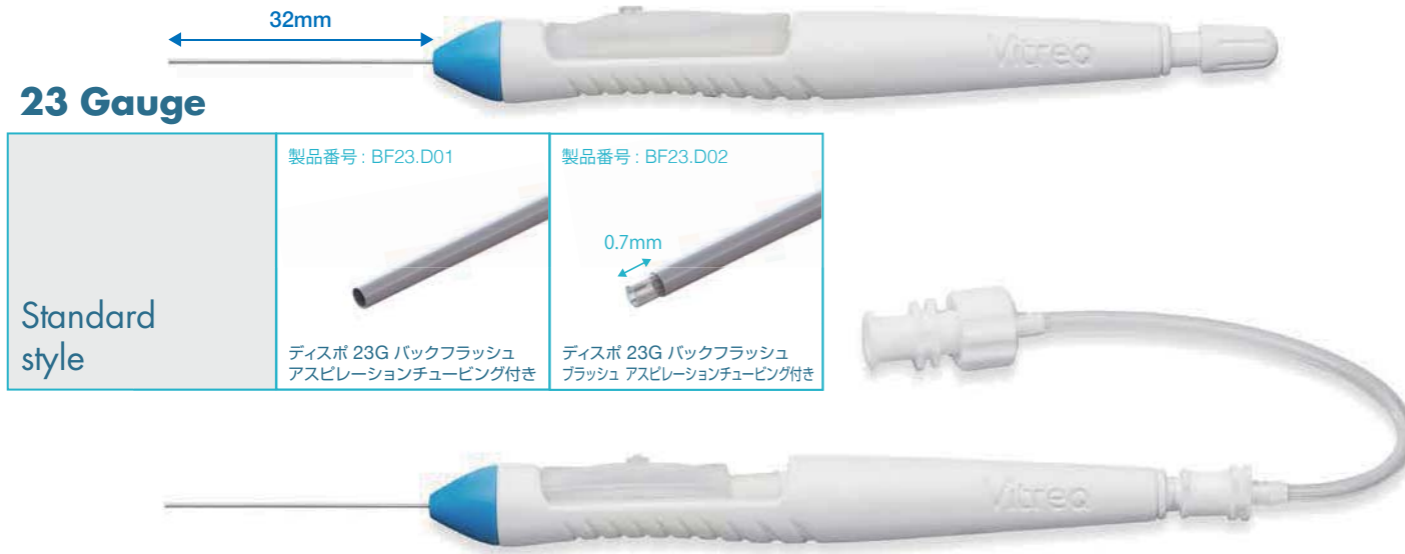

23 Gauge

Standard style	製品番号: BF23.D01	製品番号: BF23.D02
	 ディスポ 23G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	 ディスポ 23G バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチュービング付き

Retractable style	製品番号: BF23.D05	Extendable style	製品番号: BF23.D07
	 ディスポ 23G バックフラッシュ ブラッシュ 先端収納型 アスピレーションチュービング付き		 ディスポ 23G バックフラッシュ シリコチップ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き

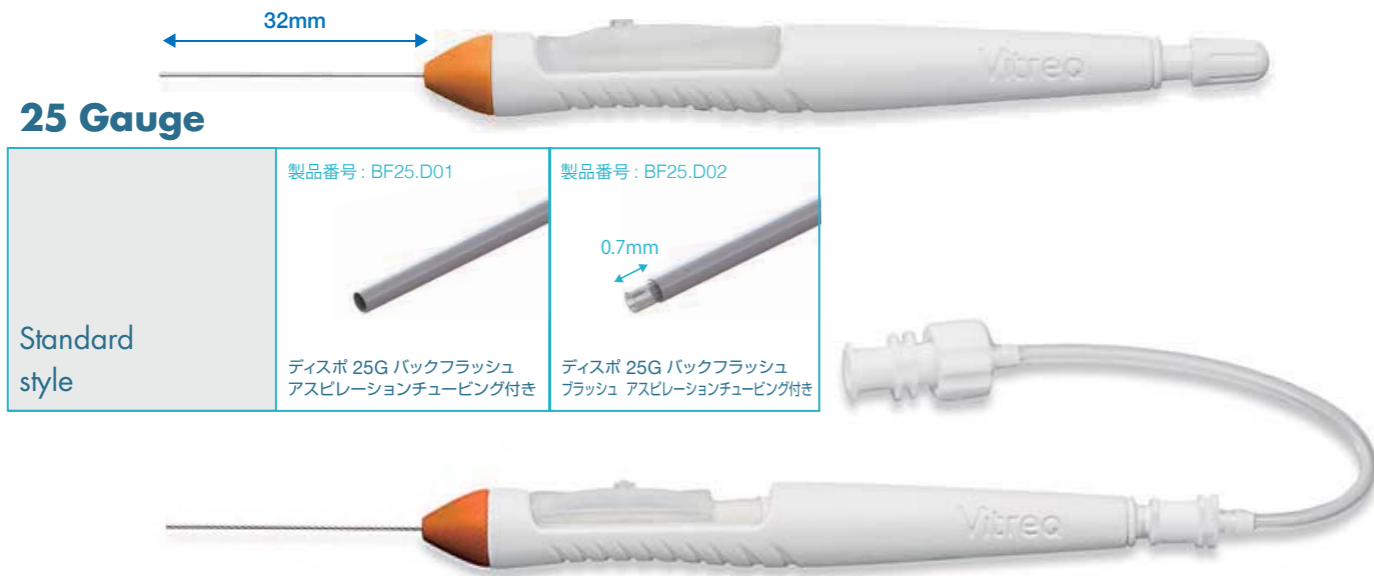

25 Gauge

Standard style	製品番号: BF25.D01	製品番号: BF25.D02
	 ディスポ 25G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	 ディスポ 25G バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチュービング付き

Retractable style	製品番号: BF25.D05	Extendable style	製品番号: BF25.D07
	 ディスポ 25G バックフラッシュ ブラッシュ 先端収納型 アスピレーションチュービング付き		 ディスポ 25G バックフラッシュ シリコチップ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き

Vitreo Only from Vitreg

~ Vitreoretinal instruments ~



Claus Eckardt, MD



先端のチップ幅は全てのゲージで0.3mmとファインに製造されています。改良された先端プラットフォームは皮膜組織の断裂を減少されており、短い先端形状は、より強い把持力を可能にしています。先端サイズは23G/25G/27Gから選択できます。



エックardt氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)

Gaurav Shah, MD



先端のファインチップは45°セレイションのプラットフォーム形状になっています。ラウンド形状の先端は皮膜組織の断裂を減少させ、更に45°のセレイションは従来以上の強い把持力を可能にしています。先端サイズは、23G/25G/27Gから選択できます。



シャー氏 X-tra グリップ 鉗子 45°

Ferenc Kuhn, MD



クーン氏パワー鉗子45°は、ILMやERMの皮膜を剥離するのに適しているだけでなく、増殖性の硝子体内の網膜上膜、水晶体被膜、虹彩、小さな眼内異物及び繊維膜等に対する処置へも大変適しています。先端サイズは、23G/25Gから選択できます。



クーン氏 パワー 鉗子 45°

Reusable micro forceps & scissors

32mm

23 Gauge

	製品番号: FC23.R02	製品番号: FC23.R03	製品番号: FC23.R04	製品番号: FC23.R05	
forceps	23G セレイテッド鉗子	23G ILMエンドグリップ鉗子	23G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子	23G エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	
製品番号: FC23.R06	製品番号: FC23.R07		製品番号: SC23.R01	製品番号: SC23.R02	製品番号: SC23.R03
23G クーン氏 パワー鉗子 45°	23G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°	scissors	23G 垂直剪刃	23G マイクロ剪刃 直	23G マイクロ剪刃 曲

32mm

25 Gauge

	製品番号: FC25.R02	製品番号: FC25.R03	製品番号: FC25.R04	製品番号: FC25.R05	
forceps	25G セレイテッド鉗子	25G ILM鉗子	25G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子	25G エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	
製品番号: FC25.R06	製品番号: FC25.R07		製品番号: SC25.R01	製品番号: SC25.R02	製品番号: SC25.R03
25G クーン氏 パワー鉗子 45°	25G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°	scissors	25G 垂直剪刃	25G マイクロ剪刃 直	25G マイクロ剪刃 曲

32mm

27 Gauge

	製品番号: FC27.R05	製品番号: FC27.R07		製品番号: SC27.R01	製品番号: SC27.R03
forceps	27G エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	27G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°	scissors	27G 垂直剪刃	27G マイクロ水平剪刃 曲

Cleaning adaptor

洗浄アダプターと滅菌用ホルダーが一体化されたユニークなデザインです。繊細な先端チップを洗浄・滅菌から保護します。



製品番号: FC00.R03
製品名: クリーニングアダプター



Disposable micro forceps & scissors

32mm

23 Gauge

	製品番号: FC23.D02	製品番号: FC23.D03	製品番号: FC23.D04	製品番号: FC23.D05	
forceps	ディスボ23G セレイテッド鉗子	ディスボ23G ILMエンドグリップ鉗子	ディスボ23G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子	ディスボ23G エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	
製品番号: FC23.D06	製品番号: FC23.D07		製品番号: SC23.D01	製品番号: SC23.D02	製品番号: SC23.D03
ディスボ23G クーン氏 パワー鉗子 45°	ディスボ23G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°	scissors	ディスボ23G 垂直剪刃	ディスボ23G マイクロ剪刃 直	ディスボ23G マイクロ剪刃 曲

32mm

25 Gauge

	製品番号: FC25.D02	製品番号: FC25.D03	製品番号: FC25.D04	製品番号: FC25.D05	
forceps	ディスボ25G セレイテッド鉗子	ディスボ25G ILM鉗子	ディスボ25G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子	ディスボ25G エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	
製品番号: FC25.D06	製品番号: FC25.D07		製品番号: SC25.D01	製品番号: SC25.D02	製品番号: SC25.D03
ディスボ25G クーン氏 パワー鉗子 45°	ディスボ25G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°	scissors	ディスボ25G 垂直剪刃	ディスボ25G マイクロ剪刃 直	ディスボ25G マイクロ剪刃 曲

32mm

27 Gauge

	製品番号: FC27.D05	製品番号: FC27.D07		製品番号: SC27.D01	製品番号: SC27.D03
forceps	ディスボ27G エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	ディスボ27G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°	scissors	ディスボ27G 垂直剪刃	ディスボ27G マイクロ水平剪刃 曲



5本/箱(滅菌済み)

販売名: Vitreq ディスポーザブル シザーズ
認証番号: 第229AFBZ100011000号

販売名: Vitreq ディスポーザブル フォーセプス
認証番号: 第229AFBZ100012000号

