

洗浄剤／潤滑剤

ユニバーサルクリーナー

ユニバーサルクリーナーは、錆防止効果のある洗浄剤／潤滑剤です。手術器具専用としてきわめて微少な隙間（ボックス・ロックやすき間）にも浸透し、水に溶けやすく、器具残留がありません。

すぐれた洗浄
&
潤滑能力

血液・タンパク質
除去

錆び・変色・腐食
防止

泡立ちが少なく
すすぎ簡単



使用方法

- 1** クリーナーを軽量カップに必要量を入れ、希釈表に沿って希釈して下さい。
- 2** 予備洗浄された器具を希釈された溶液に浸漬又は超音波洗浄器等で洗浄して下さい。
- 3** 洗浄後は、溶液の残留がなくなるまで十分にすすぎ、よく乾燥させてください。



これ1本で簡単!!

“No aminor Bi-productus”

仕様

洗浄成分	アルカリ性
製品名	ユニバーサルクリーナー
製品番号	容量・入数(箱)
400-200	1L×2本
400-600	1L×6本
400-800	3.8L×4本

希釈表

ユニバーサル	希釈倍率	10ml
水(80℃以下)	100倍	1L
温水(80℃～110℃)	200倍	2L
110℃以上(超音波洗浄等)	250倍	2.5L

洗浄時間の目安

浸漬洗浄	約5分～10分
超音波洗浄	

- △注意 この洗浄剤／潤滑剤はアルカリ性溶液です。
 1) 目、皮膚、衣類などに付着しないように注意してください。
 2) 万一目に入ったときは大量の水で洗い流した後、医師に相談してください。

輸入・販売元



株式会社 **ホワイトメディカル**
 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-48-2
 Phone.03-3802-0655 FAX.03-3802-0688
<http://www.whitemedical.co.jp>