

OPTIM 28

HIGH QUALITY CLEANING SOLUTION



洗浄時間は5分、高い洗浄力

洗浄主成分：3% 過酸化水素

販売名：Optim28 洗浄クリーナー

洗浄液性：弱アルカリ性 (pH9)

製品番号：1L/2本 (OP28-12)/1L/6本 (OP28-16)/4L/4本 (OP28-44)

希釈倍率：1 (Optim28) :128 (水/温水)

注) 水でも温水でも同じ希釈倍率です。

*Optime28 アクセサリー

販売名：Optim28専用ポンプ (FND30)



速い洗浄時間

Optim28の洗浄時間 (浸漬・超音波) は5分です。洗浄の時間効率が大幅に向上します。



高い効果の洗浄剤

Optim28は細菌やバイオフィルムの増殖等を抑え、血液・タンパク質・脂質を除去します。更に、錆びの蓄積防止の効果もあります。



人に優しい、非刺激的・Noアルコール・Noフェノール

過酸化水素は、VOC (揮発性有機化合物) を含んでおらず、有毒ガスの放出がない為換気の必要がありません。酵素成分フリー・無香な為、眼や皮膚に対して非刺激的で安全に使用できます。



環境に優しい、酸素と水に分解され安全

過酸化水素は、生物分解性で活性成分の残留がなく環境公害を減少させます。また、過酸化水素は適切に廃棄されると酸素と水に分解され安全です。

OPTIM 28 FAQ

Q OPTIM28は超音波洗浄器に使用できますか？

A どのタイプの超音波洗浄器にもご使用頂けます。

Q OPTIM28に使用期限はありますか？

A 使用期限はありません。直射日光等を避け保管してください。

Q OPTIM28はどのように廃棄すればいいですか？

A 希釈済みで未使用の溶液はそのまま直接排水できます。
未希釈又は使用済みの溶液は定められた方法で適切に廃棄してください。

Q OPTIM28で洗浄を推奨しない材質はありますか？

A カーボンスチール、アルミニウム、鉛、銅、クロム、ニッケル製の材質には使用しないでください。

Q Optim28は器具の洗浄以外に使用できますか？

A 器具の洗浄以外に使用しないでください。

Q Optim28の使用上の注意点はありますか？

A 希釈倍率及び洗浄時間を必ず守って使用してください。
そうでない場合、器具の腐食を発生させることがあります。

製造元

SciCan
A HIGHER STANDARD

販売元

WHITE
MEDICAL

株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL▶<http://www.whitemedical.co.jp>