

BioSonic[®] Solution Concentrate

バイソニック ソリューションコンセントレート

バイソニックソリューションコンセントレートは、
すべての超音波洗浄ユニットで使用可能な、
高性能な洗浄液（浸漬・超音波）です。

簡単！便利！正確！

必要な量を正確に分注する専用の MeterDose[®] ボトル



★製品番号

UC32

推奨洗浄時間：10分

製品名：バイソニック UC32 酵素洗浄液

- 凝固タンパク質（乾血、組織、唾液）を除去することで最小限の手洗浄へ
- 硬化した破片を効果的に除去・弛緩
- 予備浸漬対応可能（推奨約10分）

内容量：236 ml

▶ 8ml当たり約 1 L分の洗浄効果（計30L）

注：カリウム、アルミニウム粉、亜鉛、マグネシウム等のイオン化しやすい金属への洗浄には使用しないでください。

高濃縮なので軽量・コンパクト

▶ 重い容器の持上げ・注入不要

コンパクトなボトル

▶ 収納スペースの節約が可能

画期的なボトルデザイン

▶ 必要な希積分量だけを抽出できる！

高いコストパフォーマンス

▶ 正確な計量が可能なので無駄を抑える！

たったの **2**ステップで、無駄なく正確にご利用できます！

Step1



ボトル中央を押しながら、指定の目盛まで
洗浄液を押し上げます。
途中で圧力を弱めても、
一度、計量ネック部分に出した洗浄液は、
元に戻らないため、計量誤差を起こしにくい！

Step2



そのままボトルを傾け、
液体を水の入った洗浄タンクへ流し込んで希釈完了！
ボトルを傾けても
下部の洗浄液が漏れることはありません！

輸入元

コルテンジャパン合同会社
東京都立川市曙町2丁目25-1-2F
TEL : 042-595-6945
www.coltene.com

販売元

株式会社ホワイトメディカル
東京都荒川区東日暮里5-48-2
TEL : 03-3802-0655 / FAX: 03-3802-0688
http://www.whitemedical.co.jp/

COLTENE