

洗浄剤／潤滑剤

ユニバーサルクリーナー

ユニバーサルクリーナーは、錆防止効果のある洗浄剤／潤滑剤です。手術器具専用としてきわめて微少な隙間（ボックス・ロックやすぎ間）にも浸透し、水に溶けやすく、器具残留がありません。

すぐれた洗浄
&
潤滑能力

血液・タンパク質
除去

錆び・変色・腐食
防止

泡立ちが少なく
すすぎ簡単



これ1本で簡単!!

“No aminal Bi-productus”

■仕様

洗浄成分	アルカリ性
製品名	ユニバーサルクリーナー
製品番号	容量・入数(箱)
400-200	1L×2本
400-600	1L×6本
400-800	3.8L×4本

使用方法

- 1** ボトルを平らなところに置き、キャップを外してからボトル中央部を押して、クリーナーを計量部まで押し上げる。計量したクリーナーを希釈する容器に入れ湯又は水を入れ希釈する。キャップをしっかり締め、保管する。
- 2 浸清法** ユニバーサルは水の温度により希釈率が異なります。水1ℓあたりユニバーサル10mlを加えて希釈する。(約100倍) 温水(40℃～50℃)1ℓあたりユニバーサル5mlを加えて希釈する。(約200倍)
- 3 浸清時間** 20分～2時間(器具の汚れ度合にて希釈率&浸清時間を調整してください。)
- 4 洗浄** 洗浄(浸清又は超音波)後は十分に水洗を行ってください。

△注意 この洗浄剤／潤滑剤はアルカリ性溶液です。
1) 目、皮膚、衣類などに付着しないように注意してください。
2) 万一目に入ったときは大量の水で洗い流した後、医師に相談してください。

輸入・販売元



株式会社 **ホワイトメディカル**
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-48-2
Phone.03-3802-0655 FAX.03-3802-0688
http://www.whitemedical.co.jp